



Leise und energiesparende Sauerstoff-Langzeit-therapie

Der innovative Sauerstoff-Konzentrator *Invacare® Perfecto₂* überzeugt durch geringe Verbrauchskosten und bietet aufgrund des besonders niedrigen Geräuschpegels noch mehr Komfort für den Nutzer. Er ermöglicht eine höchst effiziente Sauerstoffversorgung von bis zu 5 l/Min. Da einzelne Komponenten 5 Jahre nahezu wartungsfrei sind, bietet der **Perfecto₂** in Verbindung mit der Füllstation **HomeFill II** die derzeit kostengünstigste Sauerstoffversorgung bezogen auf die Produktlebensdauer.

Trusted Solutions, Passionate People





Besonders leise

Der *Invacare Perfecto₂* ist kompakt und besonders leise (<37 dB (A)). Durch eine innovative Technik wurden die Kompressor- und Sauggeräusche fast komplett eliminiert. So erhält der Nutzer eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung ohne störende Nebengeräusche.

Energiesparend

Eine intelligente Software zur Steuerung der Stromversorgung gleicht den internen Druckbedarf der Ausgangsleistung an. Bei einem durchschnittlichen Gebrauch bedeutet das eine zusätzliche Einsparung von 20 Watt pro Stunde unterhalb des schon niedrigen Maximalverbrauchs von 300 Watt. Wegweisende Technologie ermöglicht den geringen Energieverbrauch bei gleichzeitig außergewöhnlicher Leistung.

Zuverlässig

Der Kompressor ist 5 Jahre oder 40.000 Betriebsstunden wartungsfrei. Dies gewährleistet, dass der Sauerstoffbedarf des Nutzers stets gedeckt ist. Dank der


Kompressor-Technologie und dem fortschrittlichen Filtermaterial hat der *Perfecto₂* mit die niedrigsten Lebens-dauerkosten unter den Sauerstoff-Konzentratoren.

Optionen und Merkmale



Energiesparend

Umweltschonend durch intelligente Software, die den Stromverbrauch steuert.

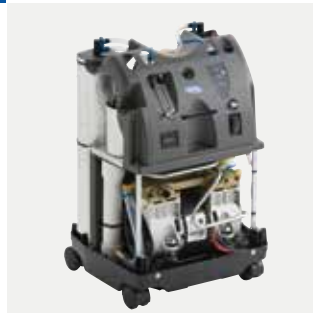

Zuverlässige Sauerstoffversorgung

Der Kompressor ist 5 Jahre bzw. 40.000 Betriebsstunden wartungsfrei.



Einfache Wartung

Die Filterwartung erfolgt durch einen sich auf der Rückseite des Konzentrators befindlichen Zugang.



Sicherheit im Gebrauch

Das **SensO₂**-System mit Kontroll- und Anzeigeelementen gibt dem Nutzer permanente Sicherheit.

Optionen und Merkmale



Nutzerfreundliches Design

Die Befeuchterflasche und die Bedienelemente sind leicht zugänglich und das Display ist gut einzusehen.



XPO₂ und Perfecto₂









Die beste Kombination für die mobile und stationäre Sauerstoffversorgung.









Anschlussmöglichkeit für HomeFill II

Leichtgewichtszylinder aus Aluminium können in Verbindung mit der Füllstation **HomeFill II** selbst befüllt werden.

Technische Daten


							
	305 mm	380 mm	585 mm	19,5 kg	230 V, 50 Hz	280 W bei ≤ 3 l/Min max. 300 W	0,5 - 5 l/Min


					
	87 - 96%	34,5kPa ± 10%	<37 dB (A)	bis 2500m	ISO8359, MDD

SensO₂ System

O₂ Konzentration

	> 85%
	- grünes Licht -
	Normal

	zwischen 73% und 85 %
	- gelbes Licht -
	Filter und Flussrate prüfen

	<73 %
	- rotes Licht -
	Wenden Sie sich an den Technischen Service

Alarmer und Sicherheit

Batteriefreier Alarm bei Spannungsverlust ■ Zurücksetzbarer Schutzschalter ■ Kontrolle der Sauerstoffreinheit durch SensO₂ ■ Kompressor-Überdruckventil ■ Kompressor-Abschaltung bei Überhitzung ■ Interner Alarm für hohen oder niedrigen Druck ■ Selbstdiagnose-Codes mit Memory-Funktion für den technischen Service ■ Alarm bei niedrigem Fluss

Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny / Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
Fax +49 7562 700-66
E-Mail kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

© 2015 Invacare International Sàrl.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen behalten wir uns vor.

Stand 10/2015



Yes, you can.®